








SECUTEST | PSI

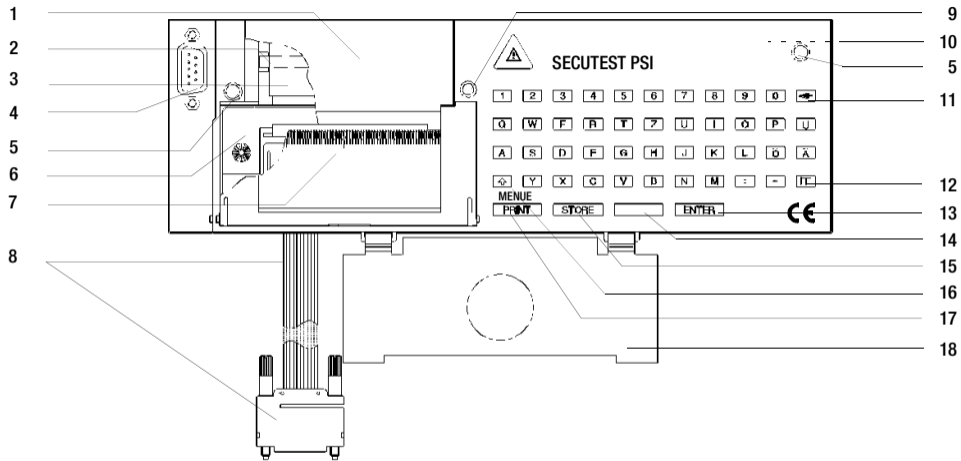








- 1 Papierfachabdeckung
- 2 Metallachse für Papierabwicklung
- 3 Papierrolle
- 4 RS232-Anschlussbuchse für PC oder Barcodeleser
- 5 Rändelschrauben
- 6 Farbbandkassette
- 7 Druckerabdeckung mit Papierabreißkante, aufklappbar
- 8 Flachbandleitung mit RS232-Stecker zum Anschluss des PSI-Moduls an das Prüfgerät
- 9 Signallampe, leuchtet bei eingeschaltetem Batteriebetrieb
- 10 Batteriefach für 4 x 1,5 V-Mignonzellen (Rückseite)
- 11 Löschtaste  zum Löschen einzelner Zeichen oder in Verbindung mit der Shift-Taste  (16) kompletter Zeilen
- 12 Taste **FF** für den Papiertransport
- 13 Eingabetaste **ENTER** zum Abschließen der Eingabe und Übergang zur nächsten Eingabeaufforderung

- 14 Leertaste  zum Eingeben von Leerstellen
- 15 Speichertaste **STORE** zum Speichern des letzten Prüfprotokolls
- 16 Shifttaste  zur Tastaturumschaltung Klein-/Großbuchstaben
Taste  schaltet dabei um auf Punkt (.)
Taste  schaltet dabei um auf Unterstrich (_)
- 17 Taste **PRINT** zum Aktivieren des PSI-Moduls und zum Starten des Druckvorganges
- 18 Klappe zum Fixieren des Sondenkabels im Deckel des Prüfgeräts SECUTEST

Kombinierte Tastaturbefehle für Protokolleingaben *(nur für Prüfgerät SECUTEST)*

-  +  Löscht die Zeile, in welcher der Cursor steht.
-  + **1** Alle Texteingaben werden gelöscht, vorausgesetzt der Cursor steht in einem aktiven Texteingabefeld
-  + **STORE** Das zuletzt gespeicherte Protokoll wird gelöscht, sofern kein PSI-Modul-Fenster aktiv ist.
-  + **0** Ein Reset wird durchgeführt, das PSI-Modul wird initialisiert, sämtliche gespeicherte Daten werden gelöscht!
Dies ist nur im Menü **Setup** und dort unter **Speicher löschen** möglich.

Inhalt	Seite		Seite
1 Anwendung	6	5 Protokoll anzeigen, drucken und speichern	12
1.1 Anwendung SECUTEST . . .	6	5.1 Protokoll anzeigen, Texte eingeben und speichern	12
1.2 Anwendung PROFITEST 204 und MAVOWATT 45	6	5.2 Protokoll automatisch speichern	14
2 Sicherheitsmerkmale und -vorkehrungen	7	5.3 Protokoll schnell speichern	14
3 Inbetriebnahme	8	5.4 Gespeicherte Protokolle abrufen	15
3.1 Farbband und Batterien einsetzen	8	5.5 Protokoll drucken	15
3.2 PSI-Modul einsetzen	8	6 Statistik	16
3.3 PSI-Modul aktivieren	9	6.1 Aufzeichnung der Statistik vorbereiten	16
4 Voreinstellungen	10	6.2 Statistische Daten abrufen und drucken	17
4.1 Uhr stellen	10	6.3 Statistische Daten löschen	19
4.2 Kopf- und Fußzeilen eingeben und löschen	10	7 Betrieb mit Barcodeleser	20
4.3 Speicher löschen	11	7.1 Anschließen des Barcodelesers	20
		7.2 Konfigurieren des Barcodelesers	20

Inhalt	Seite		Seite	
8 Batteriebetrieb	21	14	Reparatur- und Ersatzteil-Service	40
9 Übertragen von Daten über die RS232-Schnittstelle	22	15	Produktsupport	40
9.1 Schnittstellendefinition und -protokoll	22			
9.2 Befehlsumfang, Gültigkeit und Syntax	24			
9.3 Liste der Befehle für das PSI-Modul	24			
10 LC-Anzeige drucken	33			
11 Fehlermeldungen	34			
12 Technische Kennwerte	35			
13 Wartung	37			
13.1 Reset des PSI-Moduls	37			
13.2 Batterien	37			
13.3 Registrierpapier	37			
13.4 Gehäuse	38			
13.5 Farbband	39			

1 Anwendung

Das PSI (Printer Storage Interface)-Modul SECUTEST PSI ist ein spezielles Zusatzgerät für folgende Prüfgeräte:

SECUTEST ..., PROFITEST 204 und MAVOWATT 45.

Es wird in den Deckel des Prüfgeräts eingesetzt und dort mit zwei Rändelschrauben (5) befestigt.

Die mit dem Prüfgerät ermittelten Ergebnisse werden über die Flachbandleitung (8) direkt zum PSI-Modul übertragen und dort ausgedruckt.

1.1 Anwendung SECUTEST . . .

Im Speicher des PSI-Moduls können alle Messwerte für ca. 200 Protokolle (Umfang eines Arbeitstages) abgelegt werden.

Der Ausdruck der Prüfergebnisse kann in Form übersichtlicher dokumentensicherer Mess- und Prüfprotokolle mit Datum, Uhrzeit und über die Tastatur eingegebenen Texten direkt vor Ort erstellt werden.

Über einen seriellen RS232-Anschluss (4) können die gespeicherten Messwerte vom SECUTEST PSI zu einem PC übertragen und dort mit den speziellen Softwarepaketen PC.doc-WORD-EXCEL, PC.doc-ACCESS oder PS3 archiviert, verarbeitet (z. B. zur Rechnungserstellung) oder direkt in ein vorgefertigtes Formular gedruckt werden. Die Datenübertragung zum PC ist auch ohne Prüfgerät möglich.

1.2 Anwendung PROFITEST 204 und MAVOWATT 45

Der Betrieb mit diesen Prüfgeräten ist eingeschränkt. Hier sind nur folgende Kapitel relevant:

- Kap. 2 Sicherheitsmerkmale und Vorkehrungen
- Kap. 3.1 Farbband und Batterien einsetzen
- Kap. 3.2 PSI-Modul einsetzen
- Kap. 12 Technische Kennwerte
- Kap. 13 Wartung
- Kap. 14 Reparatur- und Ersatzteil-Service

2 Sicherheitsmerkmale und -vorkehrungen

Bei bestimmungsgemäßer Verwendung des SECUTEST PSI ist die Sicherheit von Anwender und Gerät gewährleistet.

Um die gesetzlichen Vorschriften über die elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) zu erfüllen, wurde zur Abschirmung ein elektrisch leitfähiger Kunststoff für das Gehäuse verwendet. Das Berühren des PSI-Moduls ist im Normalbetrieb mit keiner Gefahr verbunden, da im Drucker keine berührungsgefährlichen Spannungen vorkommen.



Achtung!

Das Gehäuse des PSI-Moduls besitzt elektrisch leitfähige, metallähnliche Eigenschaften. Es darf nicht mit spannungsführenden Teilen in Berührung kommen.

Lesen Sie die Bedienungsanleitung vor dem Gebrauch Ihres Gerätes sorgfältig und vollständig. Beachten und befolgen Sie diese in allen Punkten.

Bedeutung des Symbols auf dem Gerät

Das Symbol auf dem Gerät hat folgende Bedeutung:



Warnung vor einer Gefahrenstelle
(Achtung, Dokumentation beachten !)



Datensicherung (nur Geräte der Serie SECUTEST...)

Die Mess-, Protokoll- und Eingabedaten werden im Druckermodul SECUTEST PSI (Zubehör, nicht im Lieferumfang) in einem RAM sicher gespeichert, solange die zugehörige Batterie die erforderliche Spannung liefert.

Übertragen Sie daher Ihre gespeicherten Daten regelmäßig auf einen PC, um einem eventuellen Datenverlust im Druckermodul vorzubeugen.

Für Datenverluste übernehmen wir keine Haftung.

Zur Aufbereitung und Verwaltung der Daten empfehlen wir die folgenden PC-Programme:

- **PS3** (Messdatenübertragung zum PC, Dokumentation, Verwaltung, Protokollerstellung und Terminüberwachung)
- **PC.doc-WORD-EXCEL** (Protokoll- und Listenerstellung unter MS WORD oder MS EXCEL)
- **PC.doc-ACCESS** (Prüfdatenmanagement unter MS ACCESS)

3 Inbetriebnahme

3.1 Farbband und Batterien einsetzen

Setzen Sie vor der ersten Inbetriebnahme das Farbband ein, siehe Kapitel 13.5, Seite 39.

Zur Speicherung der Daten im PSI-Modul und zur Datenübertragung zum PC, wenn das PSI-Modul nicht vom Prüfgerät versorgt wird, sind vier handelsübliche 1,5 V Mignonzellen nach IEC LR 6 erforderlich.



Hinweis

Es sollten nur Alkali-Mangan-Zellen eingesetzt werden, die der Norm IEC LR 6 entsprechen. Von der Verwendung von Zink-Kohle-Zellen wird abgeraten, da ihre Lebensdauer zu kurz ist.

zum Speicherbetrieb bei Anschluss an SECUTEST:

Wir empfehlen vor einem Batterietausch, gespeicherte Daten über einen PC zu sichern. Gespeicherte Daten bleiben beim Batteriewechsel im Speicher erhalten, auch wenn für ca. 5 Minuten keine Spannung anliegt.

Tauschen Sie immer einen kompletten Batteriesatz aus. Entsorgen Sie die Batterien umweltgerecht. Das Batteriefach (10) befindet sich auf der Rückseite des Druckers.

- ⇨ Lösen Sie die Arretierung durch seitlichen Druck auf den Klemmverschluss des Batteriefachdeckels und entfernen Sie die Abdeckung. Durch Kippen des Moduls fällt der Batteriehalter aus dem Batteriefach.
- ⇨ Setzen Sie vier Stück 1,5 V-Mignonzellen entsprechend den angegebenen Symbolen richtig gepolt in den Batteriehalter ein.

- ⇨ Setzen Sie den bestückten Batteriehalter in das Batteriefach ein.
- ⇨ Setzen Sie den Batteriefachdeckel auf das Batteriefach und rasten Sie diesen durch leichten Druck wieder ein.



Hinweis

zum Speicherbetrieb bei Anschluss an SECUTEST:

Nach einem Batteriewechsel: Prüfen Sie eingestelltes Datum und Uhrzeit!

Waren längere Zeit keine Batterien eingelegt, z.B. nach der Werksauslieferung, so muss eine Initialisierung durch einen Reset durchgeführt werden.

Hierdurch wird ein definierter Zustand hergestellt.

Zum Auslösen eines Resets, siehe Kapitel 3.3, Seite 9 Erstinbetriebnahme.

3.2 PSI-Modul einsetzen

- ⇨ *Nur SECUTEST:* Nehmen Sie aus dem Deckel des SECUTEST die Abdeckung heraus. Drücken Sie dazu die Abdeckung in die seitliche Richtung.
- ⇨ Setzen Sie das PSI-Modul in den Deckel ein und befestigen Sie es mit den beiden unverlierbaren Rändelschrauben (5).
- ⇨ Schließen Sie das Modul über das Flachbandkabel (8) an die Anschlussbuchse der RS232-Schnittstelle des Prüfgerätes an.
- ⇨ *Nur SECUTEST:* Unterhalb des PSI-Moduls bleibt im Deckel ein Fach, das zum Aufbewahren des Sondenkabels vorgesehen ist. Arretieren Sie die in das Modul eingesteckte Klappe (18) am Gelenk des Deckels, so dass das Sondenkabel beim Schließen des Deckels nicht herausfallen kann.

3.3 PSI-Modul aktivieren

Für die Aktivierung des PSI-Moduls muss die Verbindung zur RS232-Schnittstelle des SECUTEST hergestellt und das Prüfgerät an das Netz angeschlossen sein!



Achtung!

Solange die Signallampe (9) am PSI-Modul leuchtet, findet eine Synchronisation zwischen Prüfgerät und PSI-Modul statt. In dieser Zeit können keine Prüfdaten vom PSI-Modul übernommen werden. Betätigen Sie keine Taste am Prüfgerät.

Erstinbetriebnahme

Sofern das PSI-Modul längere Zeit ohne Energieversorgung war, d. h. ohne eingelegte Batterien oder Stromversorgung durch das Prüfgerät SECUTEST, muss der Speicher komplett über ein Reset gelöscht werden:

Wählen Sie die Seite Druckermenü durch Drücken von **MENUE / PRINT** (17).

Wählen Sie anschließend das Menü **Setup** und dort das Menü **Speicher löschen**.

Betätigen Sie gleichzeitig **↑ + 0**.

Prüfen Sie nach der Initialisierung eingestelltes Datum und Uhrzeit!

Druckermenü aufrufen

1x **MENUE / PRINT** (17) drücken

Das Auswählen und Durchführen der im Menü aufgeführten Funktion erfolgt mit den entsprechenden Tasten am Prüfgerät. Die übrigen Bedienelemente und Anschlüsse sollten, während das PSI-Modul aktiv ist, unverändert bleiben, um den Datenverkehr nicht zu stören.

Der Menüpunkt „zurück“ führt zurück zu der Anzeige, die vor dem Aktivieren des PSI-Moduls auf dem LC-Anzeigefeld dargestellt wurde.

Die Anzeige **10%** zeigt an, dass 10 % des Speicherplatzes bereits belegt sind. Wenn der Speicher zu 99 % belegt ist, sollten die Daten zu einem PC übertragen und dort gespeichert werden. Anschließend müssen die Daten gelöscht werden, bevor neue gespeichert werden können. Ansonsten kommt die Meldung „Speicher voll“ und „Speicher löschen im Setup“.



4 Voreinstellungen


Nach dem Aufrufen des Menüpunktes „Setup“ können Sie folgende Einstellungen vornehmen:




4.1 Uhr stellen

Hinweis:

Beachten Sie, dass im angeschlossenen Prüfgerät gleiches Datum und gleiche Uhrzeit eingestellt sind.

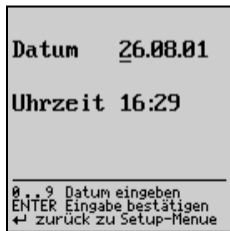

4.2 Kopf- und Fußzeilen eingeben und löschen

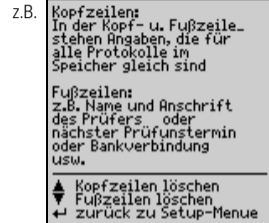

Über die Tastatur können Sie Texte nach Ihrer Wahl eingeben, die beim Protokollausdruck – vor bzw. nach dem Prüfergebnis – automatisch mitgedruckt werden sollen. Für Kopf- und Fußzeilen stehen jeweils 5 Zeilen mit je 24 Zeichen zur Verfügung.

Die Kopf- und Fußzeilen sind für alle Prüfergebnisse im Speicher gleich.

Geben Sie die Texte über die Tastatur ein

Auch über Barcodeleser (siehe Kapitel 7, Seite 20) ist die Eingabe von Daten möglich.

- ⇒ In die jeweils nächste Zeile gelangen Sie durch Drücken der Taste **ENTER**
- ⇒ Löschen können Sie die Kopf- und Fußzeilen mit den Tasten **▼** und **▲**

4.3 Speicher löschen

Um den Speicher zu löschen drücken Sie die Taste **ENTER** (13) am PSI-Modul.

Um abzubrechen drücken Sie die Taste **←** am SECUTEST.

```
Soll der Speicher wirklich
gelöscht werden ?

JA    --> ENTER
NEIN  --> ←

-----
← zurück zu Setup-Menue
```



Hinweis

Eingegebene Textdaten aus Kopf- und Fußzeile, Geräteart, Hersteller, Type sowie Angaben zum Kunden und Angaben zur Reparatur und Statistik bleiben mit „Speicher löschen“ erhalten. Diese Daten können nur durch ein Reset (**▲** + **0**) gelöscht werden.

5 Protokoll anzeigen, drucken und speichern



Hinweis

Das Speichern von Prüfergebnissen des Sicherheits- und Funktionstests sowie die Übernahme in das Protokoll und die Statistik ist nur nach durchgeführten Prüfungen möglich.

Ausnahme: der Funktionsschalter steht in der Stellung „MENUE“ (ältere Versionen: auch „FUNCTION-TEST“). Hier kann nur die jeweils auf der LCD dargestellte Anzeige ausgedruckt und das jeweils letzte Funktionstestergebnis abgespeichert werden (siehe Kapitel 10, Seite 33).

Sie können das Ergebnis der jeweils letzten Prüfung in das PSI-Modul übernehmen, dort unter einer Ident-Nr. speichern, eingeben und ausdrucken. Das Protokoll der letzten Prüfung kann mehrfach ausgedruckt werden.

Im Speicher des PSI-Moduls lassen sich die Ergebnisse eines ganzen Arbeitstages (ca. 200 Protokolle) ablegen. Durch mehrmaliges Drücken der Taste **STORE** (15) wird immer wieder der gleiche Datensatz überschrieben.

Das Prüfprotokoll enthält automatisch das Prüfergebnis mit den Mess- und Grenzwerten sowie Angaben zur Sichtkontrolle. Durch Eingaben über die Tastatur oder über einen Barcodeleser (siehe Kapitel 7, Seite 20) können Sie weitere spezifische Angaben über Prüfling, Kunde und Reparatur in das Prüfprotokoll integrieren.

Die Protokolldarstellung auf dem LCD erfolgt in mehreren Fenstern.

5.1 Protokoll anzeigen, Texte eingeben und speichern

- ⇨ Rufen Sie das PSI-Menü über die Taste **PRINT** auf
- ⇨ Wählen Sie **Protokoll** an und bestätigen Sie mit **↵**

Es wird zunächst das Prüfergebnis mit den Mess- und Grenzwerten angezeigt. Die Anzeige umfasst nur vorhandene Daten.

In weiteren, mit den Tasten **▼** und **▲**, wählbaren Fenstern können Sie Informationen über die Sichtprüfung darstellen sowie Texte über die Tastatur und Barcodes über den Barcodeleser (siehe Kapitel 7, Seite 20) eingeben. In eine Zeile können max. 24 Zeichen eingegeben werden.

Die Texteingabe einer Zeile beenden Sie durch Drücken der Taste **ENTER**. Sie gelangen dabei gleichzeitig in die jeweils nächste Zeile.

- ⇨ Drücken Sie zum Speichern die Taste **STORE**.
Durch **↵** kehren Sie zum PSI-Menü zurück.

Bei Speicherung des Protokolls wird die fortlaufende Identnummer zwischen Datum und Uhrzeit ausgegeben.

03.01.01		16:47	
UDE Messungen bestanden			
	MESSWERT	GRENZWERT	
INKL. GEBR. FEHLER			
Rsl	0.074	< 0.300	Ω
Riso	> 310.0	> 0.500	MΩ
Uiso	0537	> 0500	V
Iea	00.18	< 07.00	mA
▲ Meßwerte			
▼ Sichtprüfung			
↵ zurück			

an Prüfdose SK I	
Heizelem. od. Entstör-C	
Sichtprüfung	
bestanden	
▲ Meßwerte	
▼ Funktionstest	
↵ zurück	

Ergebnisse des Funktionstests

```
Funktionstest

PMAX    5 1 W
LF       0.3 4
IMAX    0.3 1 A
W        0.0 0 0 kWh
t        00:00:16
```

▲ Sichtprüfung
▼ Prüfling
← zurück

Angaben zur
Reparatur

max. 10 Zeilen zu
je max. 24 Zeichen

```
Angaben zur Reparatur
-
```

▲ Kunde
← zurück

z.B.

```
Angaben zur Reparatur
Auf dieser Seite können -
z.B. die verwendeten
Ersatzteile eingegeben
werden, oder es kann
eine Fehlerbeschreibung
für eine spätere
Reparatur erfolgen.
Maximal können 10 Zeilen
mit je 24 Zeichen
eingegeben werden.
```

▲ Kunde
← zurück

Bild links:
Angaben zum Prüfling
je max. 24 Zeichen

```
Angaben zum Prüfling
Geräteart:
-
Hersteller:

Type:

Identnummer:
```

▲ Funktionstest
▼ Kunde
← zurück

Bild rechts:
Angaben zum Kunden
je max. 24 Zeichen

```
Angaben zum Kunden
Name:
-
Straße Nr.:

PLZ:

Ort:
```

▲ Prüfling
▼ Reparatur
← zurück

Wenn beim Aufrufen des Menüpunktes **Protokoll**
keine Daten im Prüfgerät zur Verfügung stehen
dann erfolgt diese Meldung:

```
Keine Daten
zum Drucken
oder Speichern
vorhanden
```

← zurück zu PSI-Menue

5.2 Protokoll automatisch speichern

Sämtliche Prüfergebnisse erhalten automatisch eine fortlaufende Identnummer*, sofern die Funktion **Autostore** aktiv ist. Nach der Sicherheitsprüfung sowie nach dem Funktionstest wird jeweils ein Hinweis eingeblendet, dass die Prüfdaten gespeichert werden.

Zur Aktivierung von Autostore im Prüfgerät gehen Sie bei deaktiviertem PSI-Modul wie folgt vor:

- ⇨ **Prüfgerät SECUTEST...:**
Wählen Sie am Prüfgerät mit dem Funktionsschalter die gewünschte Prüfung.
- ⇨ **ältere Version SECUTEST 0701/0702S:**
Wählen Sie am Prüfgerät mit dem Funktionsschalter die Schalterstellung MENUE.

- ⇨ Bewegen Sie den Cursor zu **Setup...** und bestätigen Sie mit .
- ⇨ Bewegen Sie den Cursor zu **konfigurieren...** und bestätigen Sie mit .
- ⇨ Bewegen Sie den Cursor zu **Autostore:** mit  schalten Sie die Funktion ein oder aus.

* Diese besteht aus maximal 24 Ziffern. Die ersten vier Ziffern werden jeweils hochgezählt, beginnend bei 0000.

5.3 Protokoll schnell speichern

Sollen viele Messungen nacheinander durchgeführt und die Ergebnisse erst später ausgewertet werden, bietet sich die Funktion „Protokoll schnell speichern“ an. Diese Funktion ist nur nach einer Prüfung (Sicherheitsprüfung und/oder Funktionstest) durchführbar.

- ⇨ Aktivieren Sie das PSI-Modul mit **STORE**.
Sie gelangen hierdurch direkt in das Eingabefeld für die Ident-Nr. Hier können Sie max. 24 Ziffern eingeben und durch **ENTER** bestätigen.
- ⇨ Drücken Sie zum Speichern noch einmal die Taste **STORE**.

Das Protokoll wird mit allen zur Verfügung stehenden Daten in der Datenbank des PSI-Moduls gespeichert. Leere Datenfelder bleiben unberücksichtigt. Gleichzeitig gelangen Sie zurück in den Messmodus, um gleich mit der nächsten Messung fortfahren zu können.



```
Angaben zum Prüfling
Geräteart:
-
Hersteller:
Type:
Identnummer:
Funktionstest
Kunde
zurück
```







Hinweis

Wurde versehentlich ein Reset nach einer Prüfung durchgeführt, z.B. durch Umschalten des Funktionsschalters oder Abziehen des Schnittstellenkabels, so muss die Identnummer im Protokoll neu eingegeben werden. Die Daten bleiben erhalten.

5.4 Gespeicherte Protokolle abrufen

Eine Liste sämtlicher gespeicherter Protokolle kann jederzeit abgerufen werden, um den Inhalt einzelner Protokolle nachträglich anzeigen und ausdrucken zu lassen. Die erste Spalte enthält die fortlaufenden Nummern, die zweite die Identnummern. Angezeigt werden maximal die ersten 14 Zeichen der Identnummer.

- ⇒ Wählen Sie **Protokoll** an und bestätigen Sie mit .
- ⇒ Drücken Sie die Hilfe-Taste **i** (13) am SECUTEST.
Eine Liste der bereits gespeicherten Protokolle erscheint.
- ⇒ Wählen Sie mit den Tasten  und  das gewünschte Protokoll aus und bestätigen Sie mit .



Angezeigt werden maximal 10 gespeicherte Protokolle. Die jeweils nächsten 10 Protokolle werden durch Blättern mit dem Cursor ausgewählt.

In der Darstellung des archivierten Protokolls informiert in der obersten Fußzeile rechts ein **i** darüber, dass hier keine Daten mehr eingegeben werden können.

5.5 Protokoll drucken

- ⇒ Drücken Sie bei aktiviertem PSI-Modul die Taste **PRINT** (17).

Es wird das Protokoll mit allen zur Verfügung stehenden Daten, mit den eingegebenen Texten und mit den eingegebenen Kopf- und Fußzeilen gedruckt. Leere Datenfelder werden beim Druck nicht berücksichtigt. Der Druckvorgang kann beliebig oft wiederholt werden.

Nach dem Drucken wird im LC-Anzeigefeld wieder das Ausgangsmenü dargestellt.

Abbrechen des Druckvorganges

- ⇒ Drücken Sie die Taste **PRINT** (17) während das Druckwerk arbeitet.

Papiervorschub

- ⇒ Drücken Sie die Taste **FF** (12)
Der Registrierstreifen wird solange weitertransportiert wie Sie die Taste gedrückt halten.

6 Statistik

Insgesamt können statistische Daten von maximal acht Geräteklassen aufgezeichnet werden. Zu den statistischen Daten gehört die Anzahl der aufgetretenen Fehler sowie deren prozentualer Anteil an der Gesamtmessung innerhalb einer Klasse.

Das Statistik-Menü erscheint, sofern im Hauptmenü **Statistik** gewählt wurde, siehe Kapitel 3.3.



6.1 Aufzeichnung der Statistik vorbereiten

Sollen statistische Daten aufgezeichnet werden, so muss vor Beginn einer Messung die zugehörige Klassenbezeichnung durch Anwahl von Klasse festgelegt werden. Wurde bereits ein Klassenname eingegeben, so muss dieser aktiviert werden.

- ⇨ Richten Sie den Cursor auf **Klasse** und **↵**, das Menü **einstellen:** wird angezeigt.
- ⇨ Richten Sie den Cursor auf den jeweiligen Klassennamen und **↵**, ein Unterstrich erscheint am Textende.
- ⇨ Falls Sie einen neuen Klassennamen wünschen: löschen Sie bestehende Zeichen mit **←** oder zeilenweise mit **↑** + **←** und geben Sie über die alphanumerische Tastatur maximal acht Zeichen ein.
- ⇨ Bestätigen Sie mit **↵**, der Cursor springt in die Spalte Fehler.
- ⇨ Legen Sie mit **▲** oder **▼** fest, ob nur der erste oder alle Fehler zu berücksichtigen sind. Bestätigen Sie mit **↵**. Ein Blitz erscheint hinter dem aktivierten Klassennamen.
- ⇨ Bestätigen Sie sofort **zurück**, bis keine PSI-LC-Anzeige mehr erscheint.

Die Sicherheitsprüfungen sowie die Funktionstests können jetzt für die ausgewählte Klasse durchgeführt werden.

Nach dem Beginn einer Protokollaufnahme kann die Einstellung **erster** oder **alles** im Statistik-Menü nicht mehr verändert werden.

Die Messdaten müssen nach jeder kompletten Messung, bestehend aus Sicherheitsprüfung und Funktionstest, gespeichert werden, damit diese für eine statistische Auswertung zur Verfügung stehen. Siehe „Protokoll anzeigen, drucken und speichern“ auf Seite 12. Erscheint nach der Messung ein **←**-Zeichen hinter **erster** oder **alle**, so wurden für die jeweilige Klasse statistische Daten abgespeichert.

Alle folgenden Messungen erweitern die Statistik der jeweils aktivierten Klasse um die zusätzlichen Messergebnisse. Sollen für eine bereits bestehende Klasse neue statistische Daten aufgenommen werden, können die bereits gespeicherten statistischen Daten gelöscht werden, siehe Kap. 6.3 *Statistische Daten löschen*.

6.2 Statistische Daten abrufen und drucken

Zum Abruf statistischer Daten wird das Statistik-Menü angewählt:

- Richten Sie mit **▲** oder **▼** den Cursor auf **Ausdruck** und bestätigen Sie mit **↵**, das Menü **ausdrucken:** wird angezeigt.
- Wählen Sie die Klasse aus, deren statistische Daten Sie ansehen möchten, bestätigen Sie mit **↵**. Die statistischen Daten der gewählten Klasse werden auf einer Seite aufgelistet. In diesem Modus kann darüber hinaus mit Hilfe der Tasten **▲** oder **▼** zwischen den statistischen Daten aller Klassen geblättert werden.

ausdrucken:	
gesamt	
zurück	
	F E H L E R
Hausger.	erster
PC	erster ←
▶ BMG G	erster ←
BMG U	erster
Klasse E	erster
	alle
Klasse G	erster
Klasse H	erster
▲▼ auswählen	
↵ durchführen	

BMG G - erster Fehler		
	Stück:	%
Prüflinge:	2	100
Sichtfehler:	1	50.0
Rsl:	0	0
Summe ISO:	0	0
Riso	0	
IEA	0	
ISONDE	0	
ΔI	0	
FEHLERSUMME:	1	50.0
↵ zum Statistik-Menue		

ausgedruckt werden: betätigt
 en erscheint. Als Prüfzeitraum v
 ausgedruckt.
 nder ausgedruckt werden: best
 egin des zuerst geprüften Gerä
 , unabhängig von der zugehörig
 e statistischen Daten gelöscht v
 dokumentiert sind.

PC - erster Fehler		
	Stück:	%
Prüflinge:	104	100
Sichtfehler:	1	0.9
Rsl:	0	0
Summe ISO:	0	0
Riso	0	
IEA	0	
ISONDE	0	
ΔI	0	
FEHLERSUMME:	1	0.9
↵ zum Statistik-Menue		

**STATISTIK
ausdrucken**

Statistik

gesamt löschen ?

► NEIN

JA

▲▼ auswählen
← durchführen

Statistikausdruck
einer Klasse

06.11.01 16:00 SECUTEST

< Kopfzeile 1 bis 5 über PSI einstellbar >

PRÜFSTATISTIK:

Prüfzeitraum:

01.10.01 08:00 - 31.10.01 16:00

Klasse B / erster Fehler

	Stück	%
Prüflinge:	119	100
Sichtfehler:	5	4.2
Rsl:	17	14.2
Summe ISO:	0	0
Riso	0	
lea	0	
Isonde	0	
ΔI	0	
FEHLERSUMME:	22	18.4

< Fußzeile 1 - 5 über PSI, 6 - 7 über PC >

6.3 Statistische Daten löschen

⇒ Führen Sie den Cursor mit ▲ oder ▼ auf **löschen** und bestätigen Sie mit ↵.

⇒ Wählen Sie die Klasse aus, deren Daten gelöscht werden sollen.

oder

⇒ Wählen Sie **löschen: gesamt** aus, die gespeicherten statistischen Daten aller Klassen werden gelöscht!



Nach dem Löschen aller Klassen wird die Klasse A aktiv gesetzt und die Fehlerart jeder Klasse auf erster eingestellt.

7 Betrieb mit Barcodeleser

Mit dem Barcodeleser Z720A (als Zubehör) können Sie als Barcodes vorhandene Informationen schnell, leicht und sicher in die Prüfprotokolle übernehmen. Diese Art der Dateneingabe ermöglicht zeitsparendes und kostengünstiges Erfassen größerer Mengen an Information z. B. bei Serienmessungen von Geräten, die mit Barcodes versehen sind.



Hinweis

Für den Anschluss des Barcodelesers Z720A an ein SECUTEST PSI-Modul bis einschließlich Baujahr 2015 (bis Seriennummer AZ..) ist eine Umrüstung des SECUTEST PSI-Moduls erforderlich.

Wenden Sie sich hierzu bitte an unseren Service: www.gmci-service.com

7.1 Anschließen des Barcodelesers

- ⇨ Schließen Sie das Lesegerät an die RS232-Schnittstelle (4) des PSI-Moduls an.
Ein PSI-LC-Anzeigefeld darf nicht aktiv sein!
Der Barcodeleser quittiert den richtigen Anschluss mit einem 2-fachen Signalton.

7.2 Konfigurieren des Barcodelesers

Der Barcodeleser Z720A ist für folgende Barcodes konfiguriert:

CODE 39 / CODE 128 / EAN13 (12 Stellen) *

Der Barcodeleser ist sofort am SECUTEST... bzw. am SECUTEST PSI betriebsbereit.

Für den Betrieb am PROFITEST 204 muss der Barcodeleser mit dem Code der Anleitung zum Adapter für Barcodeleser konfiguriert werden. Für diese Prüfgeräte ist nur der Code 128 möglich.

Möchten Sie andere Codes für den SECUTEST... verwenden, so wenden Sie sich an unseren Produktsupport, siehe Kapitel 15.

* Z720A hat die geeignete Lesebreite, um auf den Barcode EAN 128 programmiert werden zu können

8 Batteriebetrieb

Wenn das PSI-Modul **nicht** am SECUTEST angeschlossen ist, ist nur Batteriebetrieb mit folgenden Funktionen möglich:

- Papiervorschub
- Datenaustausch mit einem PC



Hinweis

Auch bei angeschlossenem PSI-Modul müssen Batterien eingesetzt sein, damit Daten gespeichert werden können. Die Stromversorgung für alle anderen Funktionen erfolgt dann vom Prüfgerät.

PSI-Modul einschalten

- ⇒ Drücken Sie die Taste **PRINT** (17) solange, bis ein Zeilenvorschub erfolgt (ca. 5 s).

Papiervorschub einschalten

- ⇒ Drücken Sie die Taste **FF** (12). Der Papiervorschub ist solange eingeschaltet wie sie die Taste gedrückt halten.

Datenaustausch mit einem PC

- ⇒ Schließen Sie über ein Schnittstellenkabel den PC an der RS232-Anschlussbuchse (4) des PSI-Moduls an (siehe Kapitel 9, Seite 22).

Automatisches Abschalten

Das PSI-Modul wird automatisch abgeschaltet und die LED erlischt:

- wenn nicht innerhalb von 10 Sekunden nach dem Einschalten die Taste für den Papiervorschub gedrückt wird
- wenn beim Datenverkehr mit dem PC eine Pause von mehr als 10 Sekunden eintritt.

9 Übertragen von Daten über die RS232-Schnittstelle

Über die RS232-Schnittstelle können gespeicherte Protokolle, Messwerte des Funktionstests sowie statistische Daten auf einen PC übertragen werden.

- Schließen Sie dazu über ein Schnittstellenkabel den PC an der RS232-Anschlussbuchse (4) des PSI-Moduls an. Das PSI-Modul darf dabei nicht aktiv sein!



Achtung!

Eine Datenübertragung über die RS232-Schnittstelle auf einen PC ist nicht möglich, wenn das PSI-Modul zur Eingabe von Daten (für Kopf- und Fußzeilen, für Texte zum Protokoll und zum Stellen der Uhr) aktiv ist!



Hinweis

Für die Datenerfassung und -verwaltung sowie zur Protokollerstellung mit dem PC stehen die Softwarepakete PC.doc-WORD-EXCEL, PC.doc-ACCESS und PS3 zur Verfügung.



Hinweis

Die Datenübertragung vom PSI-Modul zum PC ist auch möglich, wenn das PSI-Modul am SECUTEST **nicht** angeschlossen ist und auf Batteriebetrieb geschaltet wurde (siehe Kapitel 8, Seite 21).

9.1 Schnittstellendefinition und -protokoll

Die Schnittstelle des SECUTEST PSI entspricht der RS232-Norm.

Technische Daten:

Baudrate	9600 Baud fest	Zeichenlänge	8 Bit
Parität	keine	Stopbit	1
Datenprotokoll	nach DIN 19 244, X_ON / X_OFF-Protokoll		

Die Verarbeitung der Schnittstelleninformation erfolgt über eine Interruptsteuerung, hierdurch ist das PSI-Modul ständig empfangsbereit. Zusätzlich wird das Zeichen <CR>=0D_H verwendet, um das Ende einer Meldung zu signalisieren. Sollen Hex-Zahlen übertragen werden, so sind diese in zwei ASCII-HEX-BCD-Zeichen zu konvertieren. Das Zeichen '_' (=178_D =B2_H) wird also als 'B2' dargestellt.

Steuerzeichen:

^D	Echo einschalten (sinnvoll für Terminalbetrieb*)
^F	Echo ausschalten (für Fernsteuerung durch Ablaufprogramm**)
^S / ^Q	SW-Handshake
CR	Befehlsabschluss
LF	wird ignoriert (aber als Zeilenabschluss gesendet)

* Befehlseingabe über ein Terminalprogramm eines externen PCs

** Steuerung durch externen PC z.B. mit der Software PC.doc-WORD-EXCEL, PC.doc-ACCESS oder PS3

Jede Meldung, ob Befehl oder Antwort, hat folgenden Aufbau:

**<OPERATION><ADRESSE><OPERATOR>[PARAMETER[:PARAMETER]] <DELIMITERS\$>
<CHKSUM><CR>**

<OPERATION> Dies ist der eigentliche Befehl z.B. IDN? liefert die Geräteidentifikation.
<ADRESSE> Das SECUTEST PSI kennt die Adresszustände „nicht adressiert“ und „Adresse zugeteilt“ (mit IDN).

Befehle ohne Adressierung: (allgemeine Befehle)
das SECUTEST PSI reagiert immer (z.B. um mit IDN? die aktuelle Adresse zu lesen).

Befehle mit Adressierung: das SECUTEST PSI reagiert im nicht adressierten Zustand immer, im bereits adressierten Zustand nur, wenn die gesendete Adresse mit der aktuellen übereinstimmt.

<OPERATOR> gibt an, ob es sich um
eine Anfrage ... ?
eine Zuweisung ... ! oder um
eine Antwort ... = handelt

<PARAMETER> vier Grundtypen werden unterschieden:

- TYP1: **Feste Parameter** z.B. „EIN“, „AUS“, „M“ ... Diese müssen exakt wie angegeben geschrieben werden.
- TYP2: **Variable Parameter** z.B. „GTM5015-S Serie 12345“ Hier können beliebige Zeichenfolgen (strings) übertragen werden.
- TYP3: **Numerikparameter** z.B. „<-121.0“ oder „0539“ werden mit Fließkomma (floating point) übertragen und dürfen bis zu 7 Zeichen lang sein. Diese müssen immer durch das Abgrenzungszeichen (Delimiter) „;“ voneinander abgetrennt werden.
- TYP4: **Messnummer** (bestehend aus Messart und Messbereich))

<DELIMITERS\$>: Das '\$'-Zeichen kennzeichnet als Abgrenzungszeichen das Ende einer Meldung. Danach folgt immer die Prüfsumme

<CHKSUM> Die Prüfsumme bezieht sich immer auf die gesamte vorausgehende Meldung inklusive des '\$'-Abgrenzungszeichen. Sie wird mit 2 ASCII-Zeichen übertragen.

<CR> Das Zeichen carriage return (chr\$(13)) beendet eine Meldung. Das Prüfgerät SECUTEST PSI übernimmt mit der Erkennung des <CR> eine Meldung aus dem Eingangspuffer in den Bearbeitungspuffer und führt danach eine Syntaxprüfung durch. Ist diese erfolgreich, wird eine Antwortmeldung gesendet.

Mit dem folgenden Telegramm quittiert das SECUTEST PSI, ob es einen Befehl ausgeführt hat (Y=Yes) oder nicht (N=No). Eine Quittierung erfolgt z.B. auch dann, wenn keine Antwortmeldung erforderlich ist:

Acknowledge: Befehl ausgeführt, Übertragungsformat:
Y<ADRESSE><DELIMITER\$><CHKSUM> <CR>
Not-Acknowledge Befehl nicht ausgeführt, Übertragungsformat:
N<ADRESSE><DELIMITER\$><CHKSUM> <CR>

9.2 Befehlsumfang, Gültigkeit und Syntax

Der Syntaxchecker im Prüfgerät überprüft von jedem Befehl nur die ersten drei Zeichen. Sind diese korrekt, wird der Befehl akzeptiert.

Parameter und Befehle sind so gestaltet, dass Mehrdeutigkeiten ausgeschlossen sind. Die Groß- oder Kleinschreibung spielt keine Rolle. Die Prüfsumme ist in jedem Fall nur über die tatsächlich gesendeten Zeichen auszuführen.

Der Parameter x ist die Adresse des Gerätes (SECUTEST oder SECUTEST PSI), das angesprochen werden soll. Sofern nur ein Gerät angeschlossen ist braucht keine Adresse angegeben zu werden.

Adressbereich: $0 \leq x \leq 90$

9.3 Liste der Befehle für das PSI-Modul

IDN?	liefert die Geräteidentifikation
ESR?	liefert den Gerätestatus
RST!	löscht den gesamten Speicher inklusive Kopf-, Fußzeilen, Datum, Uhr und Statistik
MEM!	löscht die Daten im Protokollspeicher
WER?	liefert den kompletten Speicherinhalt, d.h. die Daten aus dem Befehl PRO? ergänzt um die Eingaben im PSI-Modul
FKT?	liefert die Daten des Funktionstests
DAT?	liest Datum und Uhrzeit
DAT!	setzt Datum und Uhrzeit
KOP?	liest die Kopfzeilen
KOP!	setzt die Kopfzeilen 1 ... 5
FUS?	liest die Fußzeilen
FUS!	setzt die Fußzeilen 1 ... 5
FOO!	setzt die Fußzeilen 6 und 7
STA?	liest die statistischen Daten
STA!	löscht die statistischen Daten
CLA?	liest Klassenname und Kennbyte
CLA!	ändert Klassenname und Fehlerart
PRO?	liefert die Daten der Sicherheitsprüfung und des Funktionstests (siehe Bedienungsanleitung SECUTEST 0701/0702S)

Befehle die das PSI-Modul nicht kennt werden automatisch an das Prüfgerät SECUTEST weitergegeben (z. B. beim Befehl PRO?)

Geräteidentität und -Status auslesen

IDNx? Das PSI-Modul meldet die aktuelle Geräteidentität an den Aufrufer
Format: IDNx=x;GMN;SECUTEST PSI;GTM5016000R0001;DD MM YY HH MM SS\$ mit:
DD: Tag HH: Stunde
MM: Monat MM: Minute
YY: Jahr SS: Sekunde

ESRx? Das PSI-Modul meldet den aktuellen Gerätestatus:
Speicherbelegung in %
Anzahl der Protokolle im Speicher

Beispielanfrage: ESR0?\$<CS1><CS2><CR>
Beispielantwort: ESR0=;034%;0070\$
bedeutet: 34 % Speicher belegt
70 Protokolle gespeichert

Speicherinhalte löschen

RSTx! Dieser Befehl ermöglicht ein Zurücksetzen der Software des PSI-Moduls in den Zustand der Inbetriebnahme:

der Daten- und Programmspeicher wird vollständig gelöscht,
alle Zeiger werden initialisiert,
die Uhr wird auf 1.1.95 12:00 eingestellt,
die Kopf- und Fußzeilen werden gelöscht
sämtliche Protokolldaten werden gelöscht
die statistischen Daten werden gelöscht und auf Klasse A / erster Fehler eingestellt.

Das PSI-Modul antwortet mit Acknowledge im fehlerfreien Fall.

MEMx! Der Speicher, der die Protokolldaten des PSI-Moduls enthält, wird ohne Sicherheitsabfrage gelöscht.

Das PSI-Modul antwortet mit Acknowledge im fehlerfreien Fall.

Datum und Uhrzeit übertragen

DATx? Auf diesen Befehl hin werden eingestelltes Datum und Uhrzeit zurückgemeldet.

Beispielanfrage: DAT0?\$<CS1><CS2><CR>

Beispielantwort: DAT0=08.03.94;14:53\$<CS1><CS2><CR>

Systemuhr steht auf 8.März 1994, 14:53 Uhr

DATx! Befehl zum Setzen der Systemuhr im PSI-Modul entsprechend obiger Vereinbarung.

Beispiel: DATIM0!08.03.94;14:53\$<CS1><CS2><CR>

Reihenfolge beachten: erst Datum, dann Uhrzeit,
Datum im deutschen Format,
immer zwei Zeichen für Tag, Monat, Jahr, Stunde und Minute,
Trennung von Datum und Uhrzeit durch Delimiter ';

Das PSI-Modul antwortet mit Acknowledge im fehlerfreien Fall.

Kopf- und Fußzeilen übertragen

KOPx? Dieser Befehl führt zum Auslesen der Kopfzeile aus dem Speicher (für alle Protokolle gleich). Übertragen werden immer 5 Zeichenfolgen. Jede Zeile wird als eine Zeichenfolge (String) übertragen.

FUSx? Dieser Befehl führt zum Auslesen der Fußzeile aus dem Speicher (für alle Protokolle gleich). Übertragen werden immer 5 Zeichenfolgen. Jede Zeile wird als eine Zeichenfolge (String) übertragen.

Beispiel: 4 Kopfzeilen wurden eingegeben

Anfrage: KOPF0?\$CHECKSUMME<CR>

Antwort: KOPF0=Prüfprotokoll nach;DIN VDE0701 Teil1;
Prüfer;Erwin Beckenbauer;;\$CHECKSUMME<CR>

KOPx!t1;t2;...;t5 Befehl: Kopfzeilen im Datenspeicher des PSI-Moduls überschreiben.

FUSx!t1;t2;...;t5 Befehl: Fußzeilen im Datenspeicher des PSI-Moduls überschreiben.
tn > 24 Zeichen führt zu einem Zeilenumbruch nach 24 Zeichen, die restlichen Zeichen werden automatisch in die nächste Zeile geschrieben.
Wird tn weggelassen, so werden alle Zeichen in die Zeile 1 bis 5 geschrieben.
Ein Überlauf über die 5. Zeile hinaus wird ignoriert.

FOO!<t6><t7>

Befehl: Fußzeilen 6 und 7 festlegen. Diese werden nur im Statistik-Ausdruck ausgegeben.

Diese Fußzeilen können jeweils maximal 24 Zeichen enthalten. Die Fußzeilen werden nach jedem Urstart auf ihre Gültigkeit überprüft (Prüfsummenbildung) und gegebenenfalls gelöscht.

Inhalt des Funktionstest-Speichers auslesen

FKT?

Auslesen des Funktionstest-Speichers des PSI-Moduls.
Wenn der Speicher leer ist, wird mit Not-Acknowledge geantwortet.

Das PSI-Modul sendet sequentiell alle Datensätze (Records) des Speichers.
Ein Datensatz enthält einen kompletten Funktionstest des Prüfgeräts SECUTEST, z.B.:

<Pmax;L;lmax;W;t>\$CS<CR>

Wurde kein Funktionstest durchgeführt so erscheint lediglich ein \$24
(24 = Prüfsumme von \$).

Sind mehrere Records gespeichert, wird nach jedem Datensatz
statt des <CR> ein ';' als Delimiter gesendet.
Der letzte Datensatz in einer Antwort endet mit \$CS<CR>.

Inhalt des Protokollspeichers auslesen

WERx? Mit Hilfe dieses Befehls wird der Speicherinhalt des PSI-Moduls ausgelesen. Das PSI-Modul sendet sequentiell sämtliche Datensätze (Records) des Speichers. Dieser Datensatz enthält ein Protokoll, welches das Prüfgerät SECUTEST erzeugt, ergänzt um die Protokolleingaben im PSI-Modul. Sofern der Speicher leer ist, wird dieses durch eine Rückmeldung (Not-Acknowledge) quittiert.

- WEREx=** Protokoll vom SECUTEST; Datum; Zeit; Gerät; Hersteller; Type; Identnummer; Name; Straße; PLZ; Ort; Reparatur1;Reparatur2; Reparatur3; Reparatur4; Reparatur5; Reparatur6; Reparatur7; Reparatur8; Reparatur9; Reparatur10;Protokollnummer\$CS<CR>
- Sind mehrere Datensätze gespeichert, so wird nach jedem Datensatz statt des <CR> ein ';' als Abgrenzungszeichen (Delimiter) gesendet.
 - der letzte Datensatz in einer Antwort endet mit \$CS<CR>
 - innerhalb eines Datensatzes werden die Daten durch den Delimiter ';' voneinander getrennt. Liegen keine Daten vor, entfallen diese in der Aussendung, die Delimiter bleiben jedoch als Platzhalter bestehen.

Beispiel für Prüfgeräte vom Typ SECUTEST 0701 S und 0701/0702 S



Hinweis

Vom Prüfgerät SECUTEST werden nur die Daten übertragen, die auch erfasst wurden. Hieraus folgt, dass die Anzahl der übertragenen Zeichenfolgen (Strings) variieren kann.

Auf den Befehl „Wer?“ antwortet das PSI-Modul mit:

Antwort: WEREx=PHOENIX;2701000000000000;
0.23;1.0;5.23;0.5;534;500;0.003;7.0;1.37;3.5;10.06.1995;13:45;
Waschmaschine;Siemens;A0815;A1234567;Huber Franz;Untere Kanalstr. 28;
98234;Moosbach;Motor;Pumpe;Kondensator;;;;;;;;;0001\$CHECKSUMME;
PHOENIX;0602000000000000;7.34;2.00;523;500;0.23;1.0;0002\$CHECKSUMME;
TESTER;0602000000000000;7.34;2.00;523;500;0.23;1.0;0003\$CHECKSUMME<CR>

Die Zeilenumbrüche und Leertasten in den Antwortsendungen der Beispiele dienen nur der übersichtlicheren Darstellung, diese werden nicht mitgesendet. Mit dem ersten Prüfling wurde eine SKI-Prüfung mit anschließendem Funktionstest durchgeführt und ein Protokoll komplett ausgefüllt; mit dem 2. Prüfling wurde nur eine SKI-Prüfung ohne Eingaben über die Tastatur durchgeführt. Der 3. Prüfling wurde mit einem anderen Prüfgerät SECUTEST 0701/0702S (Name TESTER) gemessen, Protokoll sonst wie 2. Prüfling.

Beispiel für Prüfgeräte vom Typ SECUTEST SII, SIII und 0751/601 S

Auf den Befehl „Wer?“ antwortet das PSI Modul mit:

```
XXXXXXXX;000122000000500000000C000000050000000000;;;27.09.02;08:02:29;  
+0.015W ;<0.300W ;;;;;; +0.000mA;<3.500mA;,,,,,,,,,,,,;<0.500mA;  
,,,,,,,,,,,,; +226.6V ;+253.0V;;;  
01.01.97;12:01;Typ;Hersteller;;ID-Numer;Name;Strasse;PLZ;Ort;Rep1;2;3;4;5;6;7;8;9;0;0001$B6;  
XXXXXXXX;0001A60000006000000110000000050202000300;;allgemein;27.09.02;08:25:10;  
+0.017W ;<0.300W ;;;>+310.0MW;>2.000MW; +0530V ;+0500V ; +0.001mA;<0.500mA;  
,,,,,,,,,,,,; +000.0µA;<100.0µA;;; +000.0µA;<10.00µA;,,,,,,,,,,,,; +228.4V ;+253.0V ;;;  
01.01.97;12:24;Typ;Hersteller;;Id-Nummer;Name;Strasse;PLZ;Ort;Rep  
1;2;3;4;5;6;7;8;9;0;0002$DA
```

Die Zeilenumbrüche und Leertasten in den Antwortsendungen der Beispiele dienen nur der übersichtlicheren Darstellung, diese werden nicht mitgesendet.

Protokoll vom SECUTEST:

```
Name;BBCCDDEEFFGGHHIIKKLLMMNNOOPPQRRSSTTUUVW;ID_Nr;ID-String2;Datum;Zeit;  
MW-R-SL;GW-R-SL;MW-DR-SL;GW-DR-SL; MW_R_ISO;GW_R_ISO; MW_U_ISO; GW_U_ISO;  
MW_DI_STR;GW_DI_STR;MW_UAC;GW_UAC;MW_UAC;GW_UAC;MW_EGA;GW_EGA;  
MW_EPA;GW_EPA;MW_EA;GW_EA;MW_EA_SFC;GW_EA_SFC;MW_GA;GW_GA;  
MW-GA_SFC;GW-GA_SFC;MW-PA_AC;GW-PA_AC;MW_PA_AC_SFC;GW_PA_AC_SFC;  
MW_PA_DC;GW_PA_DC;MW_PA_DC_SFC;GW_PA_DC_SFC;  
MW_PH_AC;GW_PH_AC;MW_PH_AC_SFC;GW_PH_AC_SFC;MW_PH_DC;GW_PH_DC;  
MW_PH_DC_SFC;GW_PH_DC_SFC;MW_UHV;GW_UHV;MW_PSPG;GW_UBEZ;frei;frei
```

Legende:

MW	Messwert
GW	Grenzwert
SFC	single fault Bedingung (irgendeine der möglichen, in GG steht welche SFC nicht bestanden wurde)
AC	Wechselstrom/Wechselspannung
DC	Gleichstrom/Gleichspannung
R-SL	Schutzleiterwiderstand
D-RSL	differentieller Schutzleiterwiderstand

R-ISO	Isolationswiderstand
U-ISO	Messspannung für Isolationswiderstand
DI-STR	Differenzstrom
U	Schutzkleinspannung bei SK III
EGA	Ersatz-(Geräte)ableitstrom
EPA	Ersatz-Patientenableitstrom bei DIN VDE 0751 / Netz am Anwendungsteil bei IEC 601
EA	Erdableitstrom / Schutzleiterstrom bei DIN VDE 0702
GA	Gehäuseableitstrom / Berührstrom DIN VDE 0702 / Isonde Teil 240 / Geräte-Ableitstrom 0751
PA	Patientenableitstrom bei IEC 601
PH	Patientenhilfsstrom bei IEC 601
UHV	Hochspannung
Ubez	Bezugsspannung
PSpg	Prüfspannung (für die Messungen)
Frei	intern / zur späteren Verwendung

Auslesen von statistischen Daten

Die im PSI-Modul gespeicherten statistischen Daten für die 8 Klassen können durch folgenden Befehl abgerufen werden:

STAx?

Sollen nur die statistischen Daten bestimmter Klassen abgefragt werden, muss der Befehl durch die gewünschte Klasse ergänzt werden. Die Optionen werden jeweils in spitzen Klammern angegeben:

STAx?<A><;><;><C><;><D><;><E><;><F><;><G><;><H>

Antwort: Anzahl Prüflinge; Prozent davon (100); Anzahl Sichtfehler; Prozent davon; Anzahl R_{SL} ; Prozent davon; Anzahl Summe ISO; Prozent davon; Anzahl R_{ISO} ; Anzahl I_{EA} ; Anzahl I_{Sonde} ; Anzahl ΔI ; Anzahl Fehlersumme; Prozent davon; Name der Klasse; Kennbyte\$CS<CR>

Das **Kennbyte** setzt sich wie folgt zusammen:

01: erster Fehler; noch nichts gespeichert

02: alle Fehler; noch nichts gespeichert

1X: Fehler; etwas gespeichert

Löschen von statistischen Daten

Sollen nur die statistischen Daten bestimmter Klassen gelöscht werden, muss der Befehl durch die gewünschte Klasse ergänzt werden. **Achtung!** Wird keine Klasse angegeben, so werden die statistischen Daten aller Klassen gelöscht.

STAx!<A><;><;><C><;><D><;><E><;><F><;><G><;><H>

Dabei wird die gelöschte Statistik immer auf die Fehlererfassung 'erster Fehler' gestellt. Der einmal abgespeicherte Name wird beibehalten.

Ändern des Klassennamens und der Fehlerart

CLAx!<A='xxxxxxx';2><;><B='yyyyyyy';2><;><C=...

Die Buchstaben A ... H stehen als Platzhalter für die maximal 8 Klassennamen, denen hier jeweils 8 alphanumerische Zeichen sowie eine von zwei Fehlerarten zugeordnet werden können. Die zwei Fehlerarten sind:

- 1: nur der erste Fehler wird in der Statistik berücksichtigt
- 2: alle Fehler werden in der Statistik berücksichtigt

Außer der Trennung zwischen den Befehlen muss zwischen Klasse (A ... H) und Fehlerart (1 oder 2) mit einem Semikolon getrennt werden. Es müssen nur die Buchstaben angegeben werden, deren zugehöriger Klassenname oder Fehlerart geändert werden soll.

Ändern der aktiven Statistik

CLAx!<A><C><D><E><F><G><H>

Grundsätzlich darf nur eine Option (eine Klasse) angegeben werden!

Verschiedene Änderungen in einem Befehl

Dabei gilt dann folgendes:

- nach einer **Namensänderung** kann folgen:
 - ... durch ein Semikolon getrennt die Fehlerart
 - ... durch ein Semikolon getrennt die Einleitung einer anderen Statistik mit 'A F'
 - ... durch zwei Semikolons getrennt die aktive Statistik (muss immer am Ende stehen)
- nach einer **Fehlerartänderung**:
 - ... durch ein Semikolon getrennt die Einleitung einer anderen Statistik mit 'A F'
 - ... durch zwei Semikolons getrennt die aktive Statistik (muss immer am Ende stehen)
- nach einer **Änderung der aktiven Statistik**:
 - ... darf keine weitere Angabe folgen!

Beispiel:

verschiedene Einstellungen der Statistik für verschiedene Klassen sollen in einem Befehl durchgeführt werden:

CLA1!A=Hausger.;2;B;2;C=Kühlsch.;1;D=PC;E;2;;C

bedeutet: Statistik A: den Namen 'Hausger.' zuweisen, auf 'alle Fehler' stellen
Statistik B: auf 'alle Fehler' stellen
Statistik C: den Namen 'Kühlsch.' zuweisen, auf 'erster Fehler' stellen
Statistik D: den Namen 'PC' zuweisen, die Fehlerart bleibt erhalten
Statistik E: auf 'alle Fehler' stellen
Statistik C: aktivieren

10 LC-Anzeige drucken

Jede auf dem LCD dargestellte Anzeige kann unverändert auf dem Registrierstreifen ausgedruckt werden. Dadurch ist es auch möglich Messergebnisse auszudrucken, die in den Schalterstellungen „MENUE“ und „FUNCTION-TEST“ erzielt werden.

- ⇒ Die zu druckende Darstellung wird auf dem LCD angezeigt.
- ⇒ Aktivieren Sie das PSI-Modul durch Drücken der Taste **PRINT** (17) und rufen Sie den Menüpunkt „LC-Anzeige drucken“ auf (siehe Kapitel 3.3, Seite 9).

Abbrechen des Druckvorganges

- ⇒ Drücken Sie die Taste **PRINT** (17) während das Druckwerk arbeitet, jedoch nicht während einer Druckpause.

11 Fehlermeldungen

Meldung beim Aktivieren des PSI-Moduls, wenn die Batterien nahezu entladen sind.

Achtung !

Batterien sind schwach !

Keine Datenübertragung
über RS 232 im
Batteriebetrieb möglich !

Um Datenverlust zu
vermeiden bitte
Batterien austauschen.

← weiter zu PSI-Menue

Meldung, wenn die Taste **STORE** (15) gedrückt wird, obwohl kein Speicher mehr frei ist.

Speicher voll

Speicher löschen in SETUP

← zurück

12 Technische Kennwerte

Anschlusselemente

Befestigung am Prüfgerät	2 Rändelschrauben zum Befestigen im Deckel des Prüfgeräts; Messdatenübertragung und Stromversorgung über Flachbandleitung und 9-poligen D-SUB-Stecker, anzuschließen an der RS232-Schnittstelle des Prüfgeräts
Schnittstelle	RS232, bidirektional, 9-polige D-SUB-Buchse, z.B. zum Anschluss eines PCs oder eines Barcodelesers

Datenspeicher

RAM (Data)	100 kByte
------------	-----------

Drucker

Druckwerk	4-Nadel-Matrixdrucker
Druckbreite	40 Zeichen pro Zeile
Echtzeituhr mit Datum	batteriegepuffert


Schnittstelle

Art	RS232, seriell gem. DIN 19241
Baudrate	9600 Baud
Parität	No
Datenbit	8
Stopbit	1

Belegung der Schnittstellen


Der 9-polige D-SUB-**Anschlussstecker** für den Anschluss des PSI-Moduls an das Prüfgerät besitzt folgende Belegung:

- 1: Freigabe für Fernstg. „Plus“
- 2: RXD
- 3: TXD
- 4: NC
- 5: GROUND
- 6: Freigabe für Fernstg. „Masse“
- 7: NC
- 8: NC
- 9: +9 V

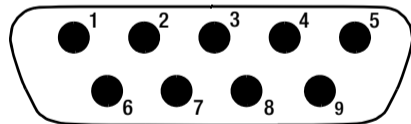

Die 9-polige D-SUB-**Anschlussbuchse** für den Anschluss von PC, Barcodeleser usw. besitzt folgende Belegung:

- 1: NC
- 2: TXD
- 3: RXD
- 4: Schalteingang
- 5: GROUND
- 6: +5 V
- 7: CTS
- 8: RTS
- 9: NC

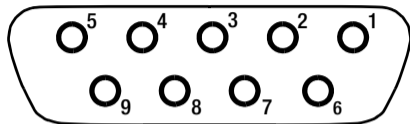

Referenzbedingungen

Batteriespannung	6 V ± 0,5 V
Hilfsenergie	9 V ± 0,5 V DC oder 8 V ± 0,5 V gleichgerichtet
Umgebungstemperatur	+23 °C ± 2 K
Relative Luftfeuchte	40 ... 60 %

Umgebungsbedingungen

Lagertemperatur	– 20 °C ... +60 °C, ausgenommen Batterien, Papier und Farbband
Arbeitstemperatur	0 °C ... +40 °C
Relative Luftfeuchte	max. 75 %; keine Betauung

Stromversorgung

Versorgungsspannung	
bei Anschluss an das Prüfgerät	6,5 V ... 12 V
bei Batteriebetrieb	4 Stück 1,5 V-Mignonzellen (Alkali-Mangan) gemäß IEC LR 6
Stromaufnahme	
Standby (Datenpufferung),	5 µA ... 200 µA
Protokoll drucken	< 500 mA
Papiervorschub	< 200 mA
Datenübertragung zum PC	< 100 mA

Elektromagnetische Verträglichkeit EMV

Störaussendung,	
Störfestigkeit	DIN EN61 326

Mechanischer Aufbau

Schutzart	Gehäuse IP 20
Abmessungen	240 mm x 81 mm x 40 mm (ohne Rändelschrauben und Flachbandleitung)
Gewicht	ca. 0,8 kg

13 Wartung

13.1 Reset des PSI-Moduls

Sollte das PSI-Modul, z.B. durch Fehlbedienung, nicht mehr reagieren, so ist dieses zu initialisieren.

- Ziehen Sie den Netzstecker des Prüfgeräts und starten Sie das Gerät neu.
Gespeicherte Daten bleiben erhalten.

oder

- **Falls gleichzeitig gespeicherte Daten gelöscht werden sollen:**
Wählen Sie das Menü **Setup** und dort das Menü **Speicher löschen**.
Betätigen Sie gleichzeitig **▲** + **0**.

Prüfen Sie nach einem Reset die eingestellte Uhrzeit!

13.2 Batterien

Wenn beim Aktivieren des PSI-Moduls das Gerät meldet, dass die Batterien nahezu entladen sind, dann sollte, um Datenverlust zu vermeiden, der komplette Batteriesatz möglichst umgehend durch einen neuen ersetzt werden (siehe Kapitel 3.1, Seite 8).



Achtung

Verbrauchte Batterien dürfen nicht im Gerät verbleiben.
Entsorgen Sie die Batterien umweltgerecht.

13.3 Registrierpapier

Kontrollieren Sie in regelmäßigen Abständen den Vorrat des Registrierpapiers. Der Matrixdrucker sollte nicht ohne Papier betrieben werden, da dies zu Beschädigungen des Druckkopfes führen kann.


Bei großer Luftfeuchtigkeit oder hohen Umgebungstemperaturen kann sich das Registrierpapier innerhalb des Druckers verformen. Das Druckwerk ist dann nicht mehr in der Lage den Registrierstreifen weiterzutransportieren.

Entfernen Sie in diesem Fall neben dem verformten Papierstreifen noch etwa 20 cm Registrierpapier zusätzlich und führen Sie das Papier neu ein.

Typbezeichnung für ein Pack mit 10 Rollen Registrierpapier: **PS-10P**

Papierrolle einsetzen

- Nehmen Sie das PSI-Modul aus dem Deckel des Prüfgeräts heraus.
- Klappen Sie zuerst die Abdeckung für das Papierfach (1) dann die Druckerabdeckung mit der Papierabreißkante (7) auf.

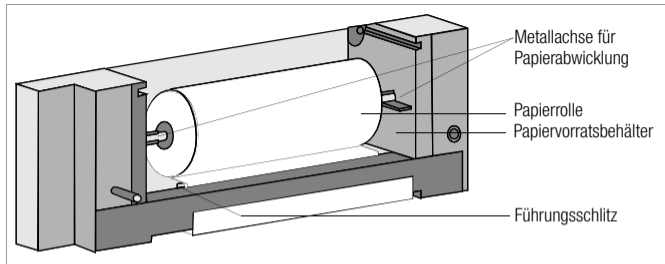

- Führen Sie die Metallachse für die Papierabwicklung (2) zuerst in die Papierrolle (3), dann zusammen mit der Papierrolle in die beiden seitlichen Halterungen des Papierfaches ein.
- Klappen Sie die Papierabreißkante (7) wieder zurück und schließen Sie die Abdeckung des Papierfaches (1) so, dass die Arretierung hörbar einrastet.

13.4 Gehäuse

Eine besondere Wartung des Gehäuses ist nicht nötig. Achten Sie auf eine saubere Oberfläche. Verwenden Sie zur Reinigung ein leicht feuchtes Tuch. Vermeiden Sie den Einsatz von Putz- und Scheuermitteln.

- Sorgen Sie dafür, dass beim Drücken der Taste **FF** (12) das Druckwerk eingeschaltet werden kann.
Dazu müssen Batterien mit ausreichender Ladung eingesetzt sein. Sollen die Batterien nicht belastet werden, dann schließen Sie – z.B. mit einem Schnittstellenkabel als Verlängerungsleitung – das PSI-Modul an das Prüfgerät an.
- Schieben Sie den Papieranfang des Registrierstreifens in den Führungsschlitz des Druckwerkes, drücken Sie gleichzeitig die Taste **FF** (12) und halten Sie sie solange in dieser Stellung bis der Papieranfang am Papieraustritt erscheint.
Bei Batteriebetrieb muss vorher das PSI-Modul eingeschaltet werden (siehe Kapitel 8, Seite 21).

13.5 Farbband

Wird der Ausdruck zu blass, sollten Sie das Farbband austauschen.




Hinweis

Typbezeichnung für ein Pack mit 10 Farbbandkassetten: **Z3210**

Mit einem Farbband können Sie ca. 6 Rollen Papier bedrucken.

Farbband austauschen

- Klappen Sie zuerst die Abdeckung für das Papierfach (1) dann die Druckerabdeckung mit der Papierabreißkante (7) auf.
- Drücken Sie zum **Ausbau** der Farbbandkassette (6) leicht auf die rechte Seite der Kassette. Die Farbbandkassette klappt aus der Halterung. Nehmen Sie die Farbbandkassette vorsichtig heraus.
- Setzen Sie die neue Farbbandkassette (6) mit der Farbbandspannschraube nach links in die vorgesehene linke Führung ein. Durch leichtes Drücken auf der rechten Seite der Kassette rastet diese fest in die Halterung ein.
- Bei eingelegtem Druckpapier muss der Papierstreifen, vor dem Einsetzen der Kassette in die Führung, zwischen Farbband und Kassette durchgefädelt werden.
Beachten Sie dabei, dass das Farbband beim Einsetzen in die Führung glatt und vollständig unterhalb des Registrierpapiers liegt. Durch Drehen der Farbband-Spannschraube kann die Spannung des Farbbandes nachgestellt werden.

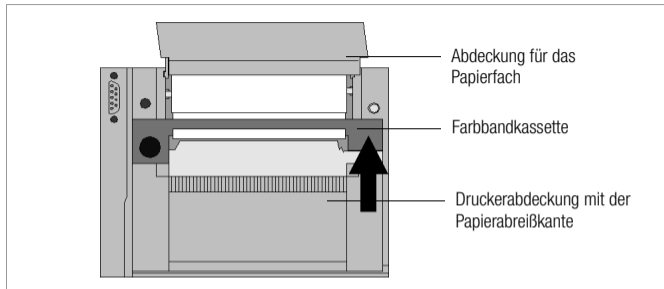

- Klappen Sie die Papierabreißkante (7) wieder zurück und schließen Sie die Abdeckung des Papierfaches (1) so, dass die Arretierung hörbar einrastet.

14 Reparatur- und Ersatzteil-Service

Bitte wenden Sie sich im Bedarfsfall an:

GMC-I Service GmbH

Service-Center

Beuthener Straße 41

90471 Nürnberg • Germany

Telefon +49 911 817718-0

Telefax +49 911 817718-709

E-Mail service@gossenmetrawatt.com

www.gmci-service.com

Diese Anschrift gilt nur für Deutschland.

Im Ausland stehen Ihnen unsere jeweiligen Vertretungen oder Niederlassungen zur Verfügung.

15 Produktsupport

Bitte wenden Sie sich im Bedarfsfall an:

GMC-I Messtechnik GmbH

Hotline Produktsupport

Telefon D 0900 1 8602-00

A/CH +49 911 8602-0

Telefax +49 911 8602-709

E-Mail support@gossenmetrawatt.com

Erstellt in Deutschland • Änderungen vorbehalten • Eine PDF-Version finden Sie im Internet

 **GOSSEN METRAWATT**

GMC-I Messtechnik GmbH

Südwestpark 15

90449 Nürnberg • Germany

Telefon +49 911 8602-111

Telefax +49 911 8602-777

E-Mail info@gossenmetrawatt.com

www.gossenmetrawatt.com